

Applicazione immediata del provvisorio in un incisivo centrale

Arturo Llobell
Spagna



Arturo Llobell

Paziente

Donna, 40 anni

Situazione clinica

Trattamento endodontico non riuscito di un incisivo centrale

Soluzione chirurgica

Sito estrattivo, posizionamento immediato dell'impianto NobelActive® TiUltra™, piccolo innesto osseo con creos™ xenogain, abutment SnapTemp

Soluzione ricostruttiva

Corona in zirconia con faccetta in ceramica stratificata solo nell'aspetto vestibolare

Data dell'intervento chirurgico

Aprile 2019

Durata complessiva del trattamento


3 mesi

Posizione del dente

11

È stato necessario estrarre un incisivo centrale irrecuperabile. La procedura è proseguita con il posizionamento immediato dell'impianto NobelActive® TiUltra™ con abutment SnapTemp e applicazione immediata del provvisorio.

L'esito clinico 5 mesi dopo il posizionamento dell'impianto mostra tessuti molli e duri sani e stabili.

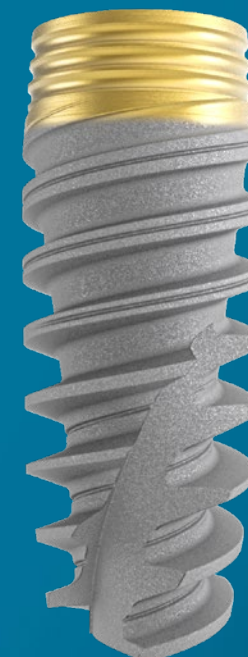

Situazione clinica iniziale

Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato



Situazione clinica iniziale.

Radiografia e scansione TC a fascio conico che mostrano il fallimento del trattamento endodontico e protesico. La paziente ha rifiutato le opzioni per il trattamento ortodontico con eruzione forzata.

Situazione clinica iniziale

Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato



Il sangue risale le filettature della superficie idrofila TiUltra™ durante il posizionamento dell'impianto.



Posizionamento immediato di un impianto NobelActive® TiUltra™ 3.5 x 13 mm in un alveolo estrattivo.


Situazione clinica iniziale



Procedura chirurgica



Procedura protesica

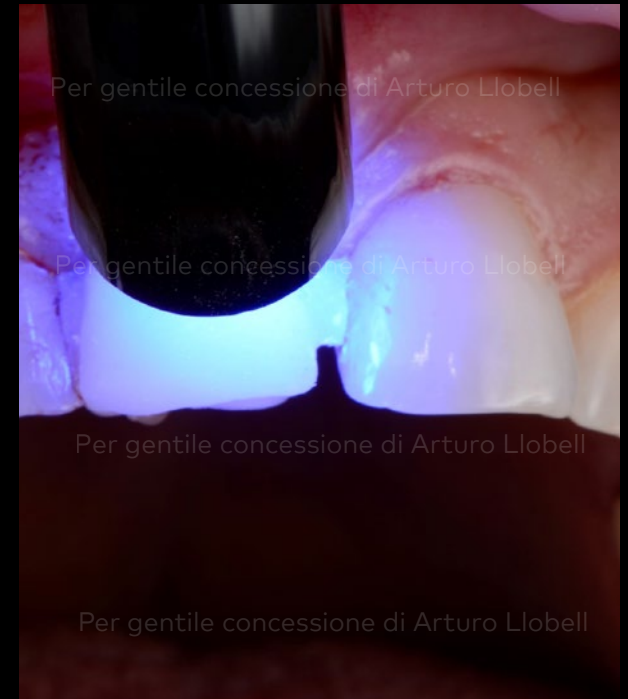

Risultato

Conservazione dell'osso con creos™ xenogain.

Abutment SnapTemp in posizione.


Polimerizzazione della resina durante
l'applicazione del provvisorio temporaneo.

Situazione clinica iniziale

Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato

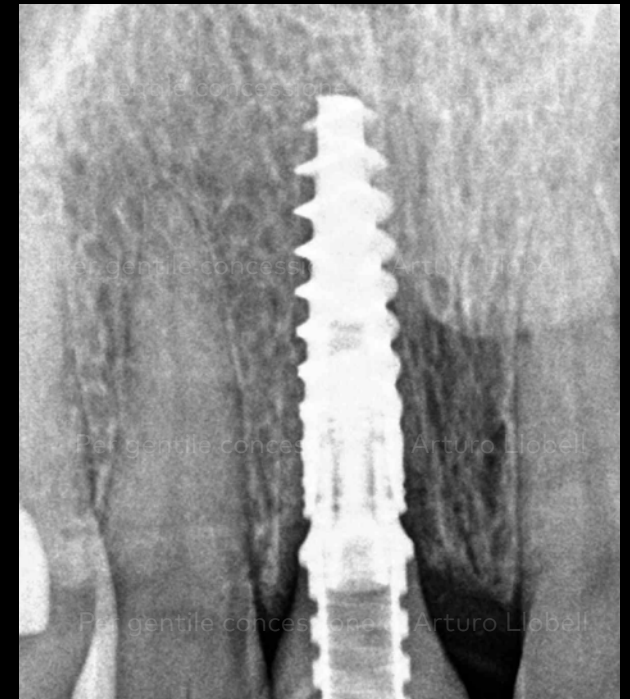

Provvisorio temporaneo il giorno dell'intervento chirurgico.

Radiografia il giorno dell'intervento chirurgico.

Situazione clinica iniziale

Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato




Transfer per impronta personalizzato.

Situazione clinica iniziale

Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato

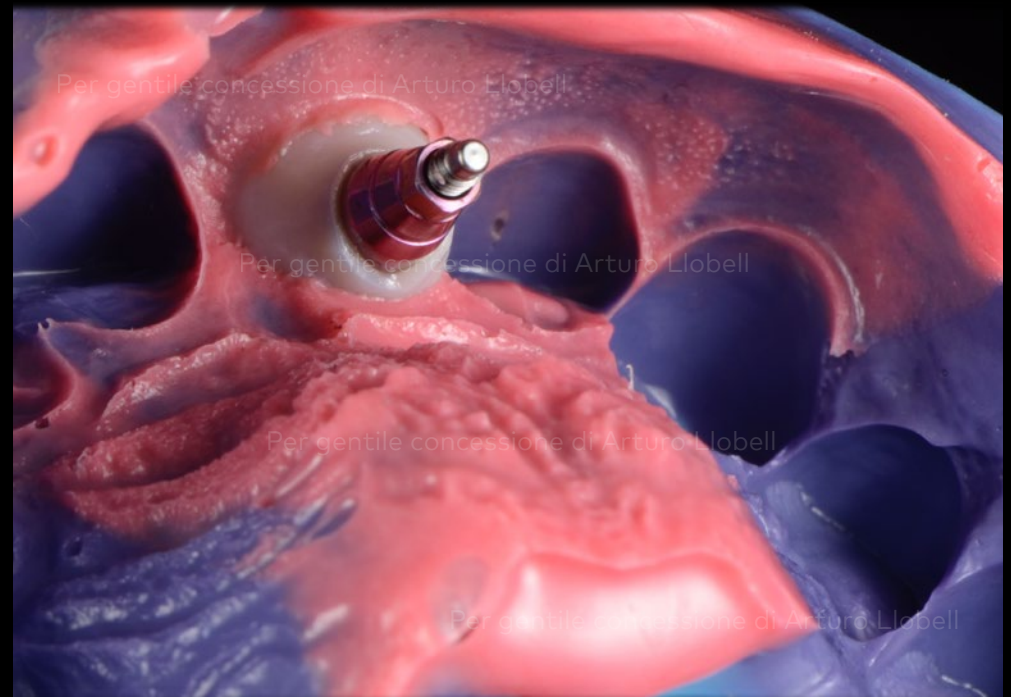


Impronta definitiva con il transfer per impronta personalizzato per riportare il profilo di emergenza nella futura protesi definitiva.

Situazione clinica iniziale

Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato

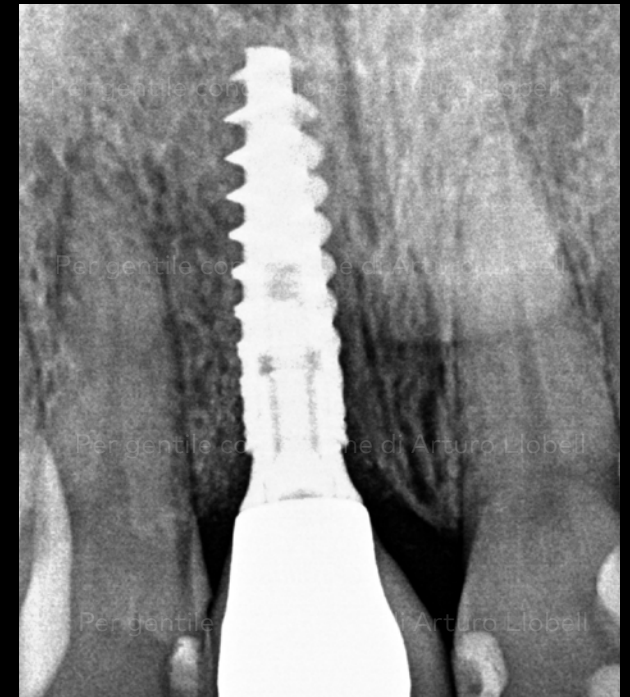

Situazione clinica 5 mesi dopo il posizionamento dell'impianto.

Radiografia al follow-up a 5 mesi.

Per gentile concessione del Dott. Arturo Llobell

