



EL NUEVO

Puente de zirconia NobelProcera® sobre implantes

Estética a otro nivel. Sin cemento. Gran flexibilidad.


El nuevo puente de zirconia NobelProcera® sobre implantes **simplifica la colaboración** entre los clínicos y los técnicos dentales gracias a su **libertad restauradora.**



Capacidad de compensar la posición del implante con el pilar Multi-unit.

La nueva combinación de pilar Multi-unit angulado y acceso angulado al tornillo proporciona una libertad restauradora de hasta 55 grados*

*Respecto al eje de inserción del implante

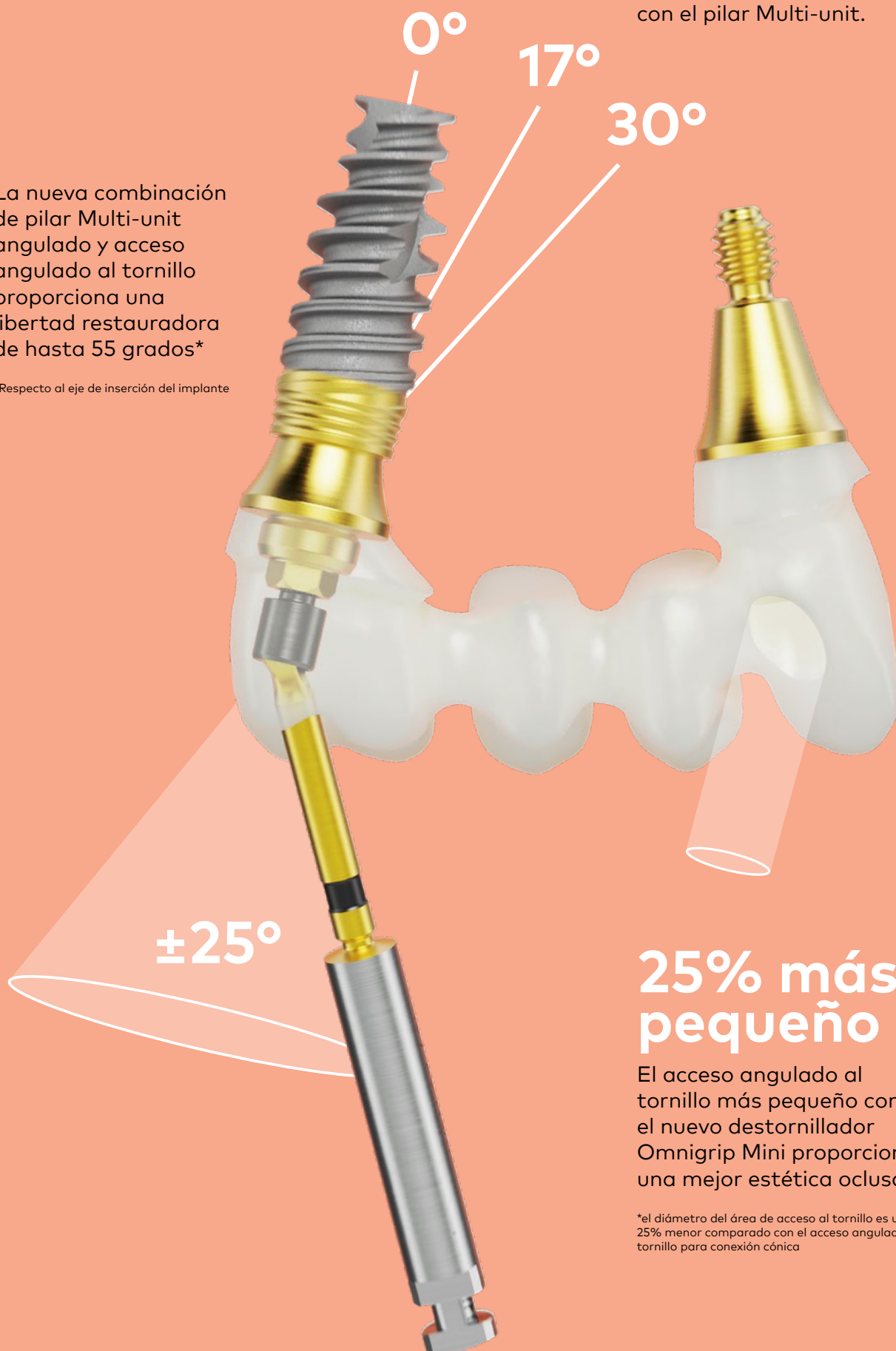

25% más pequeño

El acceso angulado al tornillo más pequeño con el nuevo destornillador Omnigrip Mini proporciona una mejor estética oclusal*

*el diámetro del área de acceso al tornillo es un 25% menor comparado con el acceso angulado al tornillo para conexión cónica

El NUEVO Puente de zirconia NobelProcera® sobre implantes



Estética a otro nivel.

Consigue una restauración de aspecto natural con nuestro nuevo material de zirconia DOCERAM Nacera® Pearl

Disponible en 10 tonalidades VITA

Con opción de acceso angulado al tornillo para mejorar el acceso en boca

NobelProcera® es una gama de soluciones premium que proporciona servicios y restauraciones personalizadas, de categoría superior, sobre implantes. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes un camino sencillo y directo a soluciones protésicas de alta calidad.

Sin cemento.

El acceso angulado al tornillo más pequeño con el nuevo destornillador Omnigrip Mini ofrece una mejor estética oclusal.*

Reduce el nivel de complejidad y ahorra tiempo eliminando el proceso de adhesión (bonding).

*el diámetro del área de acceso al tornillo es un 25% menor comparado con el acceso angulado al tornillo para conexión cónica

Gran flexibilidad.

Disponible a volumen total, con reducción, en estructura con falso muñón y en estructura con o sin tejido blando.

NobelProcera garantiza una inspección al 100% para asegurar el ajuste pasivo sobre tu diseño digital.

Nuestro nuevo
MATERIAL DE ZIRCONIA
NobelProcera®
Nacera® Pearl Shaded



Con reducción



A volumen total



Estructura con
falsos muñones



Estructura

Indicaciones y opciones de diseño

Recomendado para restauraciones anteriores y posteriores de puente sobre implantes de 2 a 14 unidades y hasta 10 implantes.

Disponible con o sin encía.

No arriesgues: nuestro material ha sido seleccionado para cumplir con los **más altos estándares de calidad** de Nobel Biocare y tener una excelente **flexibilidad restauradora.**

Ventajas del material

Consigue restauraciones de aspecto natural

- Coincidencia precisa con colores VITA
- Disponible en 10 tonalidades VITA: OM2, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2

Fiable

- Recomendado para todo tipo de restauraciones, desde 2 hasta 14 unidades
- Material producido homogéneamente para evitar el riesgo de manchas blancas
- Resistencia a la flexión de 1230 MPa


Rentable

- Sin necesidad de baño y secado
- Reduce el inventario, sin necesidad de tener un stock local de materiales

Propiedades físicas

Material	ZrO ₂ 3Y-TZP
Color	Alta translucidez natural
Densidad	> 6.04 g/cm ³
Resistencia a la flexión	1230 MPa
Resistencia a la compresión	3000 MPa
Módulos de elasticidad	205 GPa
Dureza Vickers	1300 HV0.5
Expansión térmica	10.7 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Conductividad térmica	2 W/mK
Intercepción linear media	< 0.4 μm
Solubilidad	< 10 μg/cm ²

Te ayudamos con procesos de trabajo simplificados

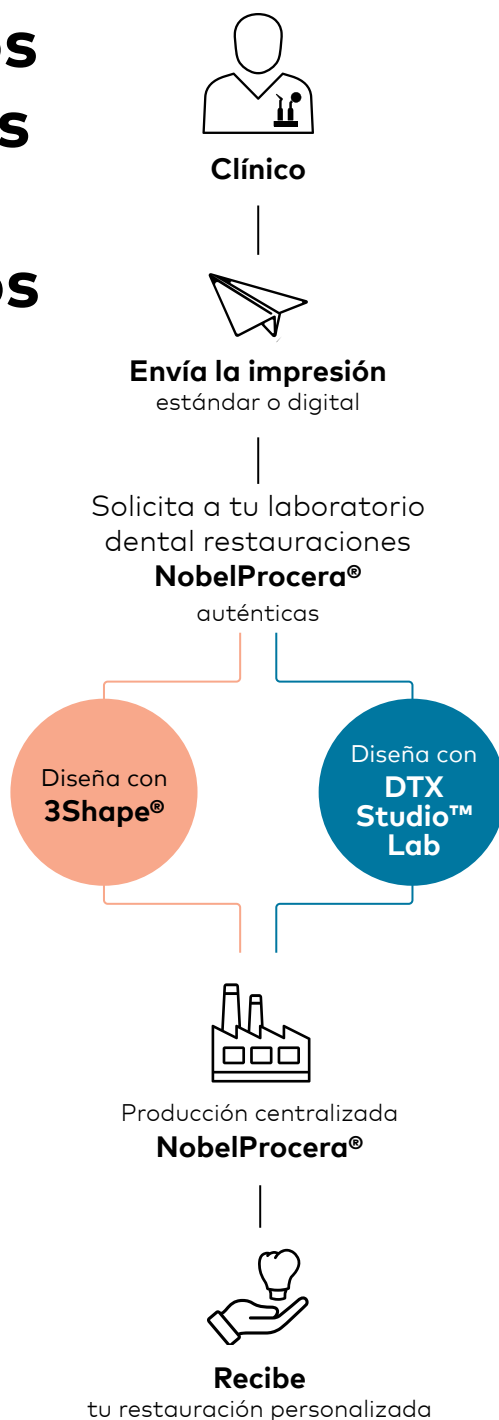

nobelbiocare.com/nobelprocera



86899 ES 2009 Impreso en la UE © Nobel Biocare Services AG, 2020. Reservados todos los derechos. Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son, a menos que se especifique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso, marcas comerciales de Nobel Biocare. Para obtener más información, visita nobelbiocare.com/trademarks. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de producto solo están destinadas a servir como ilustración y pueden no ser una representación exacta del producto. Exención de responsabilidad: Puede que no se permita poner a la venta algunos productos en algunos países según la normativa. Contacta con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Consultar la información completa sobre prescripción en las Instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.