



**VAROITUS:** Laitteen käyttöön liittyy riskejä. Käyttökoulutus vaaditaan.



Käyttöohjeet on luettava ennen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.



support@soomamedical.com




+358 10 328 9811

## 1. Valmistele päähine ja elektrodit




Ø 50-54 cm → S  
Ø 55-58 cm → M  
Ø 58-62 cm → L

Valitse stimulaation puoli:

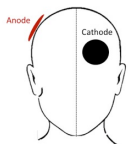

Kipu vasemmalla puolella tai vasenkätinen

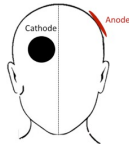

Kipu oikealla puolella tai oikeakätinen



Aseta kupit päähineen sisään ja kiinnitä johdot ulkopuolelta.

## 2. Kastele geelityynyt suolaliuoksella



Aseta geelityynyt kuppeihin



Kastele, 10 - 15 ml / geelityyny



Odota 1 min. Valmis tynny täyttää kupin.

## 3. Aseta päähine

Aseta päähineen alareuna juuri kulmakarvojen yläpuolelle. Varmista, että keskisauma on nenän kohdalla ja logo vasemmalla.



## 4. Aloita hoito




Laita virta päälle.



Kiinnitä kaapelit:  
**Punainen punaiseen**  
**Musta mustaan**



Paina nappia jatkaaksesi.

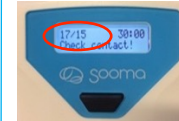


Aloita, kun kontakti on alle 15 kΩ ja näytöllä näkyy OK

Voit keskeyttää hoidon nappia painamalla.

Kun hoito päättyy, ota päähine pois ja sammuta laite.



## 5. Puhdista

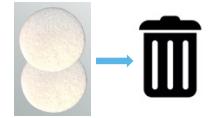

Heitä käytetyt geelityynyt pois



Huuhtele elektrodit lämpimällä vedellä ja pyyhi kuivaksi.



Pese päähine ja anna kuivua hyvin.

## Ongelmatilanteet

- Kuivia / kovia kohtia geelitynyssä.** Lisää elektrolyyttiä tai painele kovettunutta kohtaa. Jos kovettuma ei poistu, vaihda nappi uuteen.
- Geelityyny putoaa päähineen asettamisen aikana.** Jos geelityynyt putoavat, ota päähine pois ja aseta geelityynyt takaisin kuppeihin. Jos geelityyny rikkoutuu, vaihda se uuteen.
- “Tarkista kontakti” -ilmoitus näytöllä.** Paina kuppia kevyesti vapauttaaksesi elektrolyyttiä. Toista molemmille kupeille kunnes päänahka tuntuu kostealta kuppien alla. Viesti poistuu näytöltä, kun kontakti menee alle 15 kΩ. Jos kontakti on yli 50 kΩ eikä luku laske kuppeja painelemalla päänahan kosteudesta huolimatta, tarkista kaapelit ja niiden kiinnitys.
- Hoitotuntemus on voimakas.** Paina kuppia kevyesti vapauttaaksesi lisää elektrolyyttiä. Tarvittaessa pysäytä hoito nappia painamalla ja lisää suolaliuosta.

support@soomamedical.com  
+358 10 328 9811

Sooma Oy  
Atomitie 5  
00370 Helsinki

## Vasta-aiheet



Kallon sisäinen metalli tai implantti

Sydämentahdistin

Akuutti ihottuma tai haavauma hoitoalueella

## Tarkista iho, hoitolaite ja tarvikkeet ennen käyttöä

Ihon hoitoalueen alla tulee olla teve ja puhdas. Poista metalliset esineet elektrodien läheltä ennen hoidon aloitusta. Älä käytä hiustuotteita kuten geeliä tai lakkaa ennen hoitoa.

**Käytä aina uusia geelityynyjä.** Käytönjälkeinen elektrolyyttijäämä geelityynyissä muuttaa virran kulkua ja altistaa mikrobikasvulle.

Tarkista, että laite sekä tarvikkeet ovat puhtaita ja käyttökuntoisia. Vaihda elektrodit, jos metallipinta on rikki tai vääntynyt (värjäymä ei haittaa). Vaihda kaapelit, jos eristekerros on rikki tai kontaktin saaminen on vaikeaa. Laitetta ei tulisi käyttää, jos siinä havaitaan liikaa, kolhuja tai merkkejä viallisesta toiminnasta.

Päähineen kangas venyy käytössä. Päähine ja elektrodit tulee vaihtaa vähintään 3 kk:n päivittäisen käytön jälkeen. Muiden kuin Sooman hyväksymien tarvikkeiden käyttö on kiellettyä, sillä niiden turvallisuutta ei voida taata.

## Puhdista laite ja tarvikkeet käytön jälkeen

- Laita käytetyt geelityynyt yleis-/energiajätteeseen.
- Puhdista laite, kaapelit ja liittimet desinfiointiaineella.
- Huuhtelee elektrodit juoksevalla vedellä ja pyyhi kuivaksi.
- Huuhtelee päähine juoksevalla vedellä.
- Anna päähineen kuivua hyvin ennen seuraavaa käyttöä.

HUOM: Oikein puhdistettuna laite ja tarvikkeet pysyvät toimintakuntoisina pidempään.

### Pese päähine aina potilaiden välillä

- Käsinpesu tai
- Konepesu synteettisten tekstiilien pesuohjelmalla 40°C